


# MASCARILLA HIGIÉNICA-JENNER

SA99019001

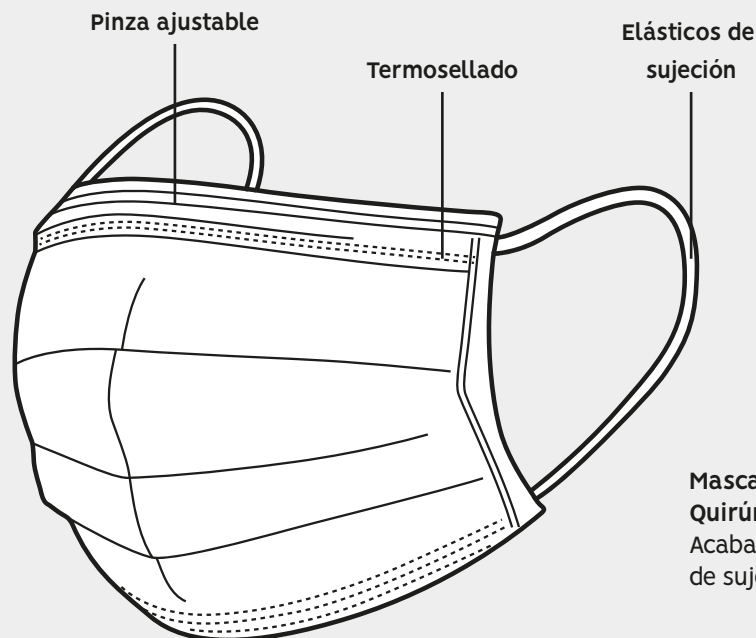

CALIDAD  
QUIRÚRGICA  
TIPO I

Mascarilla Higiénica de calidad Quirúrgica TIPO I de triple capa. Acabados termosellados, con elásticos de sujeción y pinza ajustable en la nariz.

## Especificaciones

A prueba de polen y anti-gotitas

Alta eficacia de filtración de bacterias (BFE)  $\geq 95\%$

Respirabilidad (Presión diferencial):  $<60 \text{ Pa/cm}^2$

Limpieza microbiana:  $\leq 30 \text{ UFC/g}$

Cumplimiento de la Especificación UNE 0064-1:2020

## Recomendaciones

Uso exclusivo en adultos

Mascarilla desechable de uso personal. No reutilizar.


Se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h.

## Composición

1- Non-Woven  $25 \text{ g/m}^2$

2- Meltblown cloth  $25 \text{ g/m}^2$   
(densidad  $\geq 90\%$ )

3- Non-Woven  $25 \text{ g/m}^2$

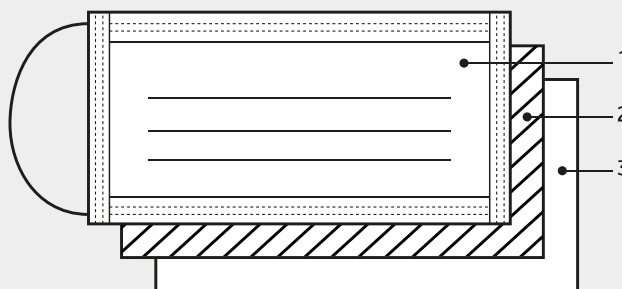

## Logística

Pack 50 uds

Caja 2500 uds

Medidas de la caja: 54,5x40x47cm

Peso: 11,4 kg/caja

Palet: 40.000 uds

# INSTRUCCIONES DE USO

## Colocación de la mascarilla:



1. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica antes de su manipulación.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla. Sostener la mascarilla desde el exterior y extender los elásticos a ambos lados de las orejas.
3. Bajar la parte inferior de la mascarilla hasta cubrir la barbilla.
4. Ajustar la banda nasal a la nariz y verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Bien sellada y sin molestias respiratorias.
5. Una vez colocada, no tocar la mascarilla con las manos. Si necesita tocar la mascarilla, debe volver a lavarse las manos.

## Retirada de la mascarilla:



1. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica.
2. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.
3. Desecharla en un recipiente provisto de una bolsa de plástico.
4. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica.

El uso de estas mascarillas no exime del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social así como del resto de medidas expuestas por el Ministerio de Sanidad.